

Матрас Density 100 с покрытием из Bielastic-полиэстера  
с огнестойкой полиуретановой водонепроницаемой и дышащей оболочкой.

## Технический паспорт оборудования



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: **Pardo**

СТРАНА: **Испания**

ПРОИЗВЕДЕНО: **2016**



**Уважаемый покупатель! В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.**

## **Технические характеристики**

### 1. Матрас состоит:

- покрытие из Bielastic-полиэстера с огнестойкой полиуретановой водонепроницаемой и дышащей оболочкой. (Биэластик-Высококачественная искусственная ПВХ-кожа, широкого спектра применения, соответствующая международному стандарту MVSS302);
- из обычной негорючей пены, плотностью 30 кг./м<sup>3</sup>. Возможность комбинирования различных покрытий со структурой и композицией пенонаполнителя позволяет предложить подходящий матрас для любой среды использования;
- матрас поставляется в компактной вакуумной упаковке.

### 2. Материал: полиуретан, термоадаптивный, не горючий, «дышащий».

### 3. Размер :

- 200 x 85 x 10 см.

## Правила хранения, транспортировки и эксплуатации

1. Транспортирование матраса с объемным наполнителем из нетканых синтетических материалов в наволочке тюфячной из мембранной синтетической ткани с пленочным покрытием, осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учётом следующих требований:
  - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -40 до +40С.
2. Матрас должен храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
  - температура окружающей среды в диапазоне от 0 до +40С.
3. Наматрасник может подвергаться обработке дезинфицирующими и моющими средствами методом орошения или протирания (не рекомендуется обработка дезинфицирующими средствами с содержанием хлора), а также сухой термической обработке при температуре не более 95°С.
4. В целях предотвращения повреждения водозащитного полиуретанового слоя наволочку тюфячную, снятую с наматрасника, категорически запрещается подвергать ручной стирке и отжиму, не допускается ставить на нее предметы, имеющие острые и режущие опоры, предметы нагретые до температуры выше 40°С, а также подвергать поверхность матраса воздействию любых химически агрессивных веществ и растворителей.

## Назначение изделия

- матрас предназначен для настила на кровать поверх ложа;
- подходит для пациентов с низким риском язвообразования и для пациентов, не страдающих ожирением, весом до 120 кг .

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех технических характеристик изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в результате неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок составляет 1 год, исчисляется со дня продажи.

Сертификат соответствия ТС № RU Д-ES.АГ47.В.10113, действителен по 13.11.2019 включительно