

## Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами

### Кресло-коляска с санитарным оснащением

#### «Ortonica» TU 55

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло-коляска с санитарным оснащением  
«Ortonica» TU 55

- 1.Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
- 2.При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
- 3.В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

**Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!**

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи \_\_\_\_\_

Сервисное обслуживание приборов производится в ООО "Реамед",  
Контактный телефон: 8(473) 233-03-32  
Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект,11



**Паспорт и инструкция пользователя**

## 1. Назначение

1.1 Кресло-коляска с санитарным оснащением «Ortonica» TU 55 предназначена для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в туалетных или других помещениях при самообслуживании, а также при уходе за инвалидом; используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

## 2. Основные технические характеристики

Ширина общая _____	63 см
Ширина сиденья _____	45 см
Диаметр колес (перед. /зад.) _____	20 / 60,5 см
Высота сиденья _____	55 см
Высота кресла-коляски _____	99 см
Грузоподъемность _____	120 кг
Вес кресла-коляски _____	21 кг

## 3. Комплект поставки

- 3.1 Кресло-коляска с санитарным оснащением «Ortonica» TU 55 .....1 шт.  
Паспорт.....1 шт.

### Примечание!

Кресло-коляска не укомплектовывается насосом и ремкомплектом в случае установки цельнолитых шин.

## 4. Меры безопасности

1. При посадке в кресло-коляску и высадке из него, рычажный тормоз должен быть надежно зафиксирован.
2. Не становиться на опоры для ног во избежание опрокидывания и поломки пластмассовых деталей.
3. Запрещено использовать изделие с неисправными тормозами .

### ВНИМАНИЕ!

**Тормозные механизмы являются стояночными и не предназначены для торможения при передвижении.**

- 4.4. Препятствия (пороги, ступеньки и др.) необходимо преодолевать с подъемом передних колес. Запрещается толкать кресло-стул на препятствие высотой более 4 см без подъема передних колес.

- 4.5. Во всех сложных ситуациях при преодолении препятствий необходима помощь сопровождающего.

## 5. Устройство

Рама кресла-коляски изготовлена из антикоррозийных материалов имеет защитно-декоративное лакокрасочное покрытие. Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Сиденье выполнено из двух частей: основной и съемной (центральной) Материал изготовления покрытия для сиденья и подлокотников – кожзамениль, для

спинки – нейлон. Санитарное устройство выдвижное и съемное. Кресло-коляска комплектуется съемными и регулируемыми по высоте подножками. Кресло-коляска снабжена стояночным тормозом. Кресло-коляска комплектуется колесами, имеющими полиуретановые или литые задние и литые передние шины. Подлокотники откидные, съемные.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию указанной модели, не ухудшающих ее потребительских свойств.**

## 6. Указания по эксплуатации

- 6.1. Высота опор для ног регулируется по длине голени индивидуально.
- 6.2. Используя кресло-стул как туалет, необходимо установить судно и поднять крышку сиденья.

## 7. Уход и обслуживание

- 7.1. Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.
- 7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.
- 7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:
  - проверку исправности тормозных механизмов;
  - проверку затяжки резьбовых соединений;
  - проверить давление в шинах (при наличии таковых);
- 7.4. Один раз в 6 месяцев необходимо произвести: смазку подшипников

## 8. Гарантии изготовителя

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.
- 8.3. Срок службы изделия 4 года.
- 8.4. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:
  - превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
  - сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
  - наезд на препятствия высотой более 4 см без подъема передних колес.

Представитель в России по гарантийному ремонту и обслуживанию:

ООО «Реамед»

Адрес : 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11.

Тел: (473) 233-0-332

Изготовитель: ZhenJiang Assure Medical Equipment Co., Ltd, «Джеджанг Ашуре Медикал Эквипмент Ко.», (Лтд), Китай,